

De nieuwe CONTOUR® Link

De CONTOUR® Link zendt bloedglucoseresultaten draadloos naar uw Paradigm® insulinepomp

Het meten van uw glucosewaarde



- 1) Plaats de CONTOUR® teststrip met het grijze uiteinde in de meter. De meter wordt automatisch gecodeerd. Het pijltje (↕) naast de datum geeft weer dat de zendoptie is ingeschakeld



- 2) Laat de teststrip de bloeddruppel opzuigen



- 3) Na 5 sec. wordt het testresultaat knipperend weergegeven totdat het resultaat is verzonden naar uw insulinepomp



- 4) Wanneer het resultaat succesvol is verzonden naar de insulinepomp stopt het met knipperen en is het testresultaat zichtbaar op het scherm van uw insulinepomp
- 5) Om één afzonderlijk resultaat niet te verzenden: plaats teststrip - druk op (▼) of (▲) totdat "OFF" in het scherm verschijnt - het resultaat zal nu eenmalig niet naar de insulinepomp worden verzonden



Voordat u begint

- Programmeer het serienummer van de CONTOUR® Link in de insulinepomp
- Zorg dat de zendoptie in de meter is ingeschakeld (Als in het scherm van de glucosemeter naast de datum een pijltje staat, is de zendoptie ingeschakeld)
- Houd beide apparaten binnen een afstand van 1,2 meter van elkaar
- Zorg dat beide apparaten voldoende batterijcapaciteit hebben. Bij een knipperende batterij in het scherm zal het resultaat niet worden verzonden
- Indien uw insulinepomp staat ingesteld op de meeteenheid mmol/L dient u dit te wijzigen in mg/dL. Dit doet u op de volgende manier:
 1. Druk op ACT om in het hoofdmenu te komen
 2. Selecteer Bolus
 3. Selecteer Setup boluswizzard
 4. Selecteer Instellingen wijzigen
 5. Selecteer BG-eenheden en kies hier voor mg/dL
 6. Druk 5 x op ESC en uw Paradigm insulinepomp staat correct ingesteld



CONTOUR®
LINK
Wireless Blood Glucose Monitoring System



Bayer HealthCare
Diabetes Care

DE GLUCOSEMETER INSTELLEN

Wanneer u uw CONTOUR® Link bloedglucosemeter ontvangt staat de zendoptie standaard altijd aan

In- / Uitschakelen van de zendoptie




Houd de M knop ingedrukt totdat u in het set-up systeem komt

- 1) Het zendsymbool (↑) wordt boven in het scherm weergegeven en ON knippert in het scherm. Dit wil zeggen dat de zendoptie is ingeschakeld
- 2) Kies (▼) of (▲) om de zendoptie uit (OFF) of aan (ON) te zetten
- 3) Druk op M om te bevestigen
- 4) Druk nogmaals enkele keren op M om het Set-Up menu te verlaten. In het set-up menu kunt u eventueel ook tijd, datum etc. wijzigen



Kijk voor meer informatie in de CONTOUR® Link gebruiksaanwijzing

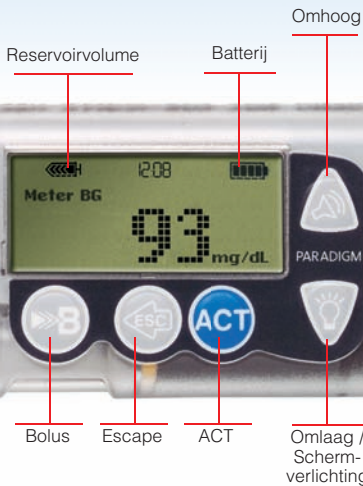

Kijk voor meer informatie in de Paradigm® insulinepomp gebruiksaanwijzing




Medtronic
Alleviating Pain · Restoring Health · Extending Life

DE INSULINEPOMP INSTELLEN


Druk op ACT om in het hoofdmenu te komen. Selecteer HULPPROGRAMMA'S en kies OPTIES METER



Kies AAN om in het METER ID MENU te komen

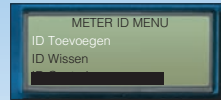


Kies ID TOEVOEGEN en druk op ACT

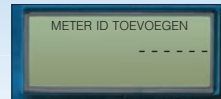

(Knipperend)

Gebruik de omhoog/omlaag knop om het zescijferige serienummer - dat op de achterkant van de CONTOUR® Link meter staat. Druk op ACT na ieder cijfer

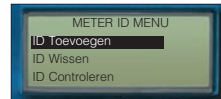

Nadat u het laatste cijfer heeft ingevoerd, komt u in het METER ID MENU. Druk op ESC om het menu te verlaten

Voor meer informatie over de CONTOUR® Link bloedglucosemeter, bel naar 0800 97 212

Voor meer informatie over insulinepompen en continue glucosemonitoring ga naar www.medtronic.be

© 2007 Bayer HealthCare LLC. CONTOUR is een geregistreerd handelsmerk van Bayer HealthCare LLC. Bayer, het Bayer kruis, No Coding en het No Coding logo zijn geregistreerd als handelsmerken van Bayer AG. Paradigm, Guardian en Bolus Wizard zijn geregistreerde handelsmerken van Medtronic MiniMed, Inc.



CONTOUR
Wireless Blood Glucose Monitoring System **LINK**



Bayer HealthCare
Diabetes Care